

RETAINER ORTODONTIK

Celesi i suksesit: Adaptimi dhe ngjitja e Ribbond-it shume ngjitur me dhembin dhe shtrirja e tij deri ne zonat interproximale.

E ngjashme me nje brakete, e holle dhe fine, rezultat optimal Splintimi.

1. **Mat gjatesine e nevojshme per Ribbond:** ne siperfaqet e dhembeve vendoset nje sasi e vogel kompoziti dhe siper saj pershtatet nje shirit i holle tinfoil ose fill dentar duke e shtrire deri ne zonat interproximale per te patur nje gjatesi korrekte para se te presim Ribbond-in. pasi kemi bere matjen, pastrojme dhembin nga kompoziti. Pastro dhembet dhe apliko nga nje linje te holle acidi tek dhembet e planifikuar per trajtim. Acidifikohet vetem siperfaqja e nevojshme per retension. Pas pastrimit te acidit aplikohet bondi dhe me pas vjen polimerizimi.
2. **Pri Ribbond.** Me ane te preseles nxirret Fibra Ribbond nga paketimi dhe pritset ne baze te gjatesise se marre ne fillim ne nje siperfaqe te paster (mundesisht sterile). Pas prerjes se Ribbond, pjesa e mbetur, futet serish ne paketimin e vet.
3. **Lag Fibren Ribbond me sealant (bond rezinoz).** Me ndihmen e preseles e zhysim fibren Ribbond ne Bond rezinoz derisa e lagim te gjithen. Vetem pasi e kemi lagur Ribbondin mund ta prekim me gishta ose dorezat e latexit.
4. **Vendos kompozit mbushes (lehtesisht viskoz) mbi dhemb:** Pasi eshte pergatitur dhemb me procedura standarte si pastimi, acidifikimi dhe bondimi, vendosim nje shtrese te holle kompoziti lehtesisht viskoz, ne trajte shiriti duke e shtrire edhe ne zonat interproximale (pikat e kontaktit). Pritet akoma per polimerizim.
5. **Pershtat Ribbond-in ne siperfaqet dhembore.** Poziciono fibren Ribbond permes kompozitit ngjitur me siperfaqet dhembore, duke e thelluar deri ne zonat interproximale. Fillo me njerin skaj te fibres duke vazhduar me siperfaqen e cdo dhemb deri ne perfundimin gjatesise se punes.

Mbaje te fiksuar Ribbond-in e ngjitur ne dhemb me gisht ose instrument, per t'u siguruar se nuk priset gjatesia e punes. Per pozicionimin ne zonat interproximale perdoret nje spatul e holle kompoziti. Kjo teknike vazhdon deri ne dhembin e fundit.

6. **Hiq pjesen e tepert te kompozitit dhe polimerizo.** Perdor nje instrument (spatul e holle kompoziti) per te larguar pjeset e teperta te kompozitit nga Ribbond ne drejtim Mezio-Distal, pasi kjo e fundit shmang rrezikun e zhvendosjes se Ribbond nga vendi i pozicionuar me pare. Polimerizo.
7. **Apliko shtresen e mbulimit te kompozites dhe polimerizo.** Apliko nje shtrese te holle kompoziti flow mbi Fibren Ribbond duke perdorur furca aplikimi, instrumenta ose maja shiringash, duke bere nje shperndarje te njetrajtshme ne menyre qe te mos nevojitet pas polimerizimit perdorimi I disqeve dhe gomave. Polimerizo.

Nese eshte nevoja per pastrim, kihet kujdes per te mos vepruar ne brendesi te zones se fibres. Fibra nuk pastrohet dhe lustruhet.

Zyrat: Rruga "Sulejman Delvina", pallati 33, Tirane, 1001, Albania

Tel: +355 (4) 22 55 168 Mob: + 355 69 20 60 983 / 984

Fax: +355 (4) 22 48 779 E-mail: info@mediklineshp.com

www.mediklineshp.com

RETAINER ORTODONTIK

8. Retainer i perfunduar. Rezultati final i Retainerit Ribbond: Estetik dhe komod.

P.S. Duhet nenvizuar ndryshimi mes Ribbond retainer, i cili shtrihet deri ne zonat interproximale dhe telit te gatshem qe sherben gjithashtu si nje retainer. (Ky i fundit nuk ka rezultate te kenaqshme)

Ruajtes pas mbylljes se diastemes:

1. Behet nje preparim minimal ne dhemb ne nivelin e kontakteve dhe pergatiten per bondim. Me pas vendoset nje shtese e holle kompozit ne zonen e preparuar. Nuk duhet polimerizuar ende.
2. Lag dhe pershtat Ribbond. Lag Ribbond me bondin rezinoz dhe poziciono fibren ngjitur me bazen e preparuar. Polimerizo.
3. Apliko shtresen e flow kompozit mbi fiber duke e shperndare me furce dhe keshtu eshte zhdukur retainer- i metalik dhe pragjet qe do formoheshin nga kompoziti.

Ndryshe nga harku metalik, Ribbond ofron mundesi te larta estetike, respekton me perpikmeri pikat e kontaktit dhe eshte e padukshme.

Zyrat: Rruga "Sulejman Delvina", pallati 33, Tirane, 1001, Albania

Tel: +355 (4) 22 55 168 Mob: + 355 69 20 60 983 / 984

Fax: +355 (4) 22 48 779 E-mail: info@mediklineshpk.com

www.mediklineshpk.com